




ホープ電子

Endo ロール




特長


- 内視鏡下外科手術において、挿入が困難なシート状癒着防止吸収性バリアをスムーズにかつ的確に腹腔内へ挿入できます。
- 5mmポートで使用できます。
- 再使用可能（ただし、キャップは単回使用）

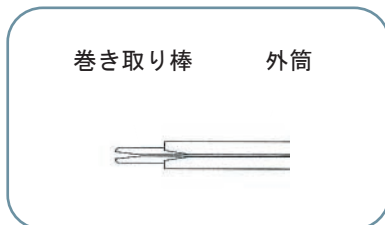

巻き取り棒の先端が外筒より 1cm 程見えるようにする。
巻き取り棒のスリットと外筒のスリットの位置を合わせる。

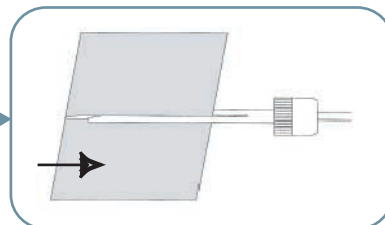

巻き取り棒の先端からシート状癒着防止吸収性バリア（シート）をスリットに挿入する。

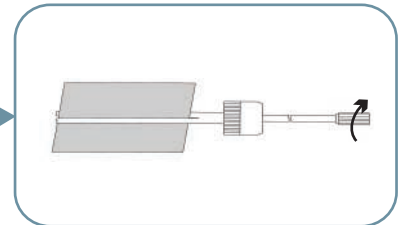

巻き取り棒をゆっくり回転させ、シートを外筒内へ完全に収納する。5mm ポートから腹腔内へ挿入する。巻き取り棒をゆっくりと押していき、シートを広げる。

製品コード	製品名	スリット長	外筒外径
SR001	Endo ロール	70mm	Φ5.5

製品コード	製品名	入数
HAB-C	キャップ	30個

医療機器届出番号：12B2X00014000053

製造販売元

株式会社平田精機

〒273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17

販売元

ホープ電子株式会社

〒273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17

TEL 047-389-5755

URL <http://www.hope-denshi.co.jp>

2019.1