


セプラフィルムにおける Endoロール使用方法の一例

監修：札幌医科大学 産婦人科学講座 講師 松浦 基樹 先生




①ホルダーのフラップを開く (裏側に折り曲げない)

※セプラフィルムは半透明です
見やすくするために茶色フィルムを使用しています

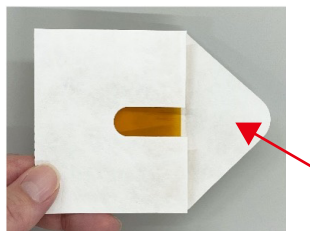


②Endoロールのスリットを合わせ、 ホルダー(紙)ごと挟む


巻き取り棒の先端を少し出した状態で
挟むとやりやすい

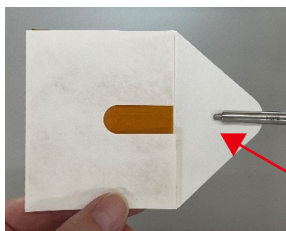

③矢印先端のところまで Endoロールを進める

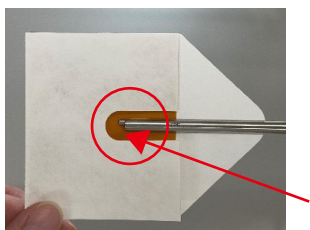


④セプラフィルムが落ちないように ホルダー(紙)をはがす

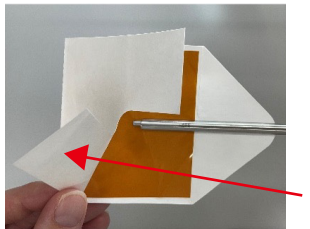


⑤医師から挿入の合図があるまでは この状態を保つ

《注意》数分以内・長時間放置不可

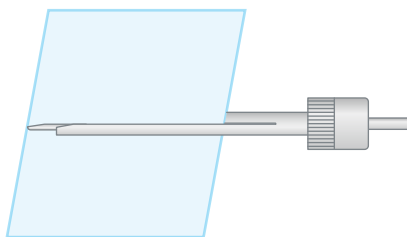

⑥医師から挿入の合図を受けてから 巻き取り棒をゆっくり回転させ、 セプラフィルムを外筒内へ完全に収納する ➔ 医師へお渡し

《注意》急激に巻き取らない

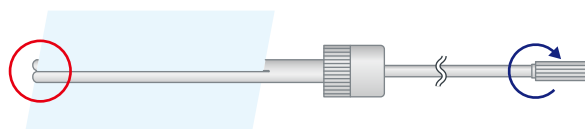

巻き取り時は「外筒」、「巻き取り棒」、「セプラフィルム」の
先端を合わせる

Endoロール概要 一般医療機器 リユース可能 (ホープ電子株式会社)

