

ミニミニトロカールスリーブ

切開創におかれた開創器に装着し、腹腔鏡下手術における手術器具（5～5.5mm 径）の挿入口となる。
通常のスレート鉗子を使用した平行式単孔式手術を施行できる。





- トロカールスリーブや鉗子の干渉がおきない！
- 本体は再滅菌、再使用可能で経済的
- アクセサリ（シールバルブ・キャップ）は使い捨て
- 気腹ガスが漏れない
- 必要に応じて1～3本装着可能



臍部開創器リデューサに本品を装着し、補助鉗子として「細径鉗子 Endo Relief」を使用。

使用方法

1. 本品を洗浄、滅菌する。（推奨 オートクレーブ滅菌）
2. ハウジング又は気腹ポート付ハウジングにシールバルブ及びキャップを取りつける。
3. 開創器リデューサ（フタ）にΦ4の穴をあけ、ハウジング又は気腹ポート付ハウジングとカニューラとでゴム又は樹脂膜を挟み、ネジを強く締め付けて、固定する。

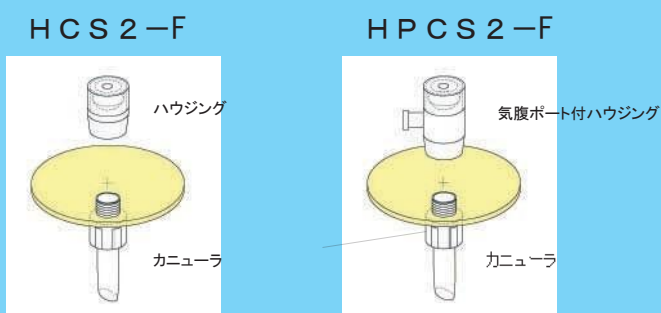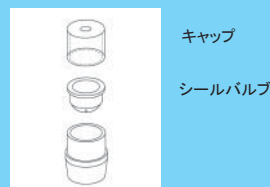

4. 3. を腹壁に設置された開創器に装着する。
5. 気腹ポート付ハウジングの場合は、ルアーコネクター付チューブを接続して気腹ガスを導く。
6. 器具等を挿入する際は、器具のシースに滅菌済潤滑油を必ず塗布してから使用する。

製品コード	商品名	入数
HCS2-F	ミニミニトロカールスリーブ	1組／箱
HPCS2-F	ミニミニトロカールスリーブ 気腹ポートあり	1組／箱
HAA2	アクセサリ 5mm用	各30個／箱

医療機器届出番号：12B2X00014000021

製造販売元

株式会社平田精機

〒273-0128 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 2-10-17

販売元

ホープ電子株式会社

〒270-2231 千葉県松戸市稔台1-22-5

TEL 047-710-3692

URL <https://www.hope-denshi.co.jp>