


Endo ロール

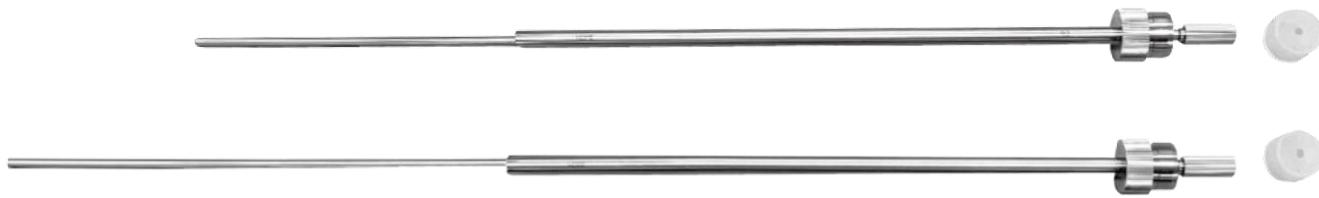


★ Endo ロール ロング 新発売 !!

“ロボット手術などにより遠くで展開が必要な症例に”

特長

- 内視鏡下外科手術において、挿入が困難なシート状癒着防止吸収性バリアをスムーズにかつ的確に腹腔内へ挿入できます。
- 5 mmポートで使用できます。
- 再使用可能（ただし、キャップは単回使用）

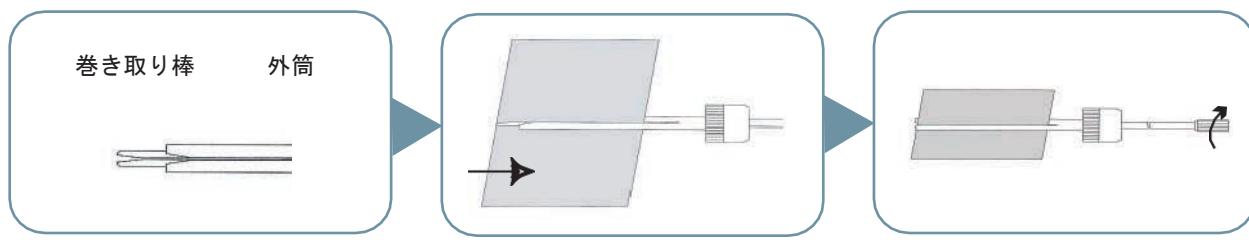

巻き取り棒の先端が外筒より1cm程見えるようにする。
巻き取り棒のスリットと外筒のスリットの位置を合わせる。

巻き取り棒の先端からシート状癒着防止吸収性バリア（シート）をスリットに挿入する。

巻き取り棒をゆっくり回転させ、シートを外筒内へ完全に収納する。5mmポートから腹腔内へ挿入する。巻き取り棒をゆっくりと押していく、シートを広げる。

製品コード	製品名	有効長	スリット長	外筒外径
SR001	Endo ロール	300mm	70mm	Φ5.5
SR002	Endoロールロング	350mm	70mm	Φ5.5

医療機器届出番号 : 12B2X00014000053

製品コード	製品名	入数
HAB-C	キャップ	30個

製造販売元

株式会社平田精機

〒273-0128 千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17

販売元

ホープ電子株式会社

〒270-2231 千葉県松戸市稔台1-22-5

TEL 047-710-3692

URL <http://www.hope-densi.co.jp>

2024. 12